



NoRed

MED

Dispositivo Medico ad azione protettiva e filmante, in particolare dell'area peristomale e perilesionale.

Grazie alle proprietà filmanti dei suoi componenti e in particolare dell'Acido ialuronico, **NoRed MED** crea una barriera protettiva e idratante sulla cute in grado di prevenire la comparsa di nuove irritazioni.

La presenza di Fluorescina Sodica e Lisozima, dalle proprietà antibatteriche, conferisce alla barriera la capacità di proteggere l'area trattata dalle aggressioni microbiche di agenti esterni.

L'Allantoina, con azione lenitiva e normalizzante, favorisce il ripristino delle condizioni fisiologiche della cute irritata o arrossata.

Per questo motivo il Dispositivo Medico è particolarmente indicato come barriera protettiva delle aree peristomali e perilesionali per le sue proprietà idratanti e filmogene.

Istruzioni d'uso:

lavare accuratamente le mani e asciugarle

applicare il gel sulla punta delle dita

distribuire sull'area con un leggero massaggio

lasciar asciugare: il dispositivo medico forma naturalmente un film trasparente protettivo

ripetere l'applicazione al bisogno

Controindicazioni:

Ipersensibilità accertata verso i componenti.

Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicinali.

Non sono noti fenomeni di sovradosaggio.

Per la sua formulazione è adatto a uso ospedaliero.

IPOALLERGENICO

NICHEL TESTED <0,00001%

Formati disponibili:

15ml Minsan **970379754**

30ml Minsan **970976282**

Numero di repertorio: **1378336**

CND A1080 Dispositivi per Stomia – Accessori

Codice ISO: 09.18.30.006



Moleco Laboratoires Srls
Via J.F. Kennedy 1
Marcaria (MN)

www.moleco.it
info@moleco.it

MOLECO[®]
LABORATOIRES